



ALLES SPÜLT

ANLEITUNG ZUM PCR-TEST IN DER SCHULE

www.bmbwf.gv.at/allesspuelt

WICHTIG

30 MINUTEN VOR DEM TEST NICHT ZÄHNE PUTZEN, KAUGUMMI KAUFEN, TRINKEN, ESSEN ODER RAUCHEN.


TESTRÖHRCHEN
MIT LÖSUNG



QR-CODES



SCHUTZBEUTEL

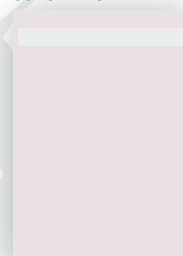

SICHERE SCHULE
www.sichereschule.at

Bundesministerium
Bildung, Wissenschaft
und Forschung

COVID-19 NACHGEWIESEN
DIE SCHULE INFORMIERT DIE SCHÜLERIN/
DEN SCHÜLER, DIE ELTERN/
ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN UND DAS LABOR.

COVID-19 NICHT NACHGEWIESEN
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

1



- Löse einen QR-Code vom Bogen
- Klebe ihn oben mittig auf den grünen Deckel des Röhrchens

Wichtig!

- Sticker FEST auf den sauberen/trockenen Verschluss (nicht auf das Röhrchen) aufdrücken
- Sticker feststreichen – auch am Rand!

2



- Öffne das Teströhrchen
- Leere die Flüssigkeit in den Mund
- Spüle die Flüssigkeit 30 Sekunden im gesamten Mundraum im Kreis

3



- Spucke die Flüssigkeit in das Teströhrchen

4



- Verschließe das Teströhrchen mit der Verschlusskappe

Wichtig!


- Schraubverschluss FEST zudrehen!

5



- Gib die Probe in den Schutzbeutel und verschließe ihn gut

6

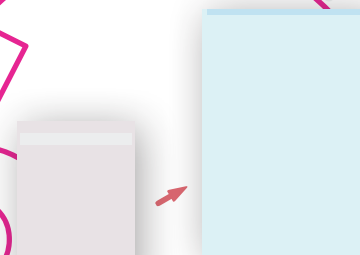

- Gib die Probe in den Sack.